


Qufora® IrriSedo Klick

Beknopte handleiding


1

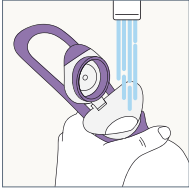

Zorg ervoor dat het ventiel op de slang van de waterzak gesloten is. Vul de waterzak met lauw kraanwater (36-38°C).

U hebt meer water in de waterzak nodig om het systeem gebruiksklaar te maken dan wat er nodig is voor de irrigatie, maximaal 300 ml.


2

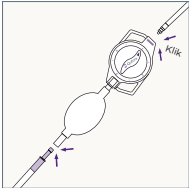

Sluit de slang van de waterzak aan op de pomp.

Sluit de klickslang aan op de controle-unit.


3

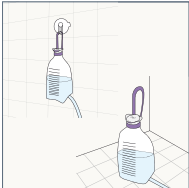

Plaats de waterzak ergens tussen vloer- en schouderhoogte.




4

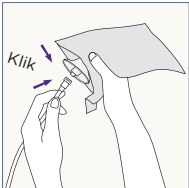

Sluit het andere uiteinde van de klickslang aan op de katheter.

5

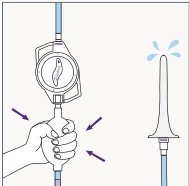

Vorbereiden

Houd de pomp met de controle-unit naar boven gericht en open het ventiel op de slang van de waterzak.

Knijp in de pomp totdat de pomp vol met water zit, zodat er geen lucht meer achterblijft en er water uit de katheter komt.

Als u het systeem gebruiksklaar heeft gemaakt, draait u de controle-unit naar de stip tussen stand 1 en 2. De stip stopt de waterstroom en er zit een stip tussen elke stand.




6



Een paar seconden


Houd de katheter onder de kraan of dompel de katheter enkele seconden tot aan de basis onder water om de hydrofiele coating te activeren.

7

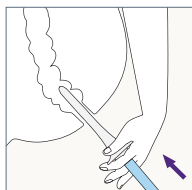


Ga op de wc zitten of hang boven de wc. Indien nodig, bevestigt u de controle-unit aan uw bovenbeen met behulp van de bevestigingsband.

Breng de katheter voorzichtig in het rectum in.

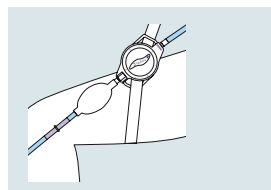


8

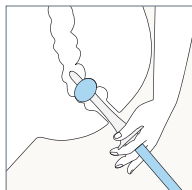

Vullen

Knijs de pomp 2-3 keer in (maximaal 5 keer volledig pompen) totdat de katheter vanzelf in het rectum blijft zitten, of zoals geadviseerd door uw arts of verpleegkundige.

9

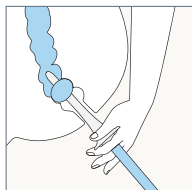


Irrigeren

Als de waterzak hangt: laat het water met behulp van zwaartekracht de darm instromen of knijp in de pomp.

Als de waterzak staat: knijp in de pomp om water de darm te laten instromen.

i Volg het advies van uw arts of verpleegkundige met betrekking tot de hoeveelheid te gebruiken water.

10

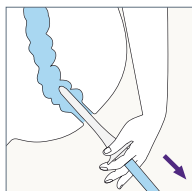


Laten leeglopen

De ballon loopt daarna leeg en de katheter kan uit het rectum worden verwijderd. Water en ontlasting zullen nu uit de darm stromen.

Sluit het ventiel op de slang van de waterzak.

11

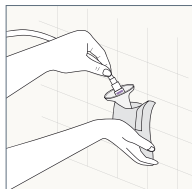

Klik de gebruikte katheter los in het zakje. Sluit het zakje en gooi het weg bij het huishoudelijk afval.

i De katheter is voor eenmalig gebruik en mag niet opnieuw worden gebruikt.

Reiniging en opslag

Indien nodig kan de buitenkant van het systeem worden gereinigd met lauw water en milde zeep. Droog af met een pluisvrije doek. Hang het systeem op om te drogen met het deksel van de waterzak en het ventiel op de slang van de waterzak open en laat de controle unit in positie 1 staan.



Raadpleeg vóór gebruik altijd het document 'Gebruiksaanwijzing' dat bij het product wordt geleverd.

www.qufora.com